

# 北海道ラグビーフットボール協会 簡易抗原検査キット「ICheck」実施マニュアル

感染拡大予防対策ご協力に感謝いたします。皆さんの検査結果を一元的に把握するために、「ICheck」の実施の際に、事前の ICheck カルテ登録をお願いいたします。

ICheck カルテ登録の方法は次の通りです。

ご自分のスマホを用意ください。（スマホをお持ちでない場合は文末ガイドを参照ください）

## 1. 抗原検査 ICheck カルテ QR コードを読みます

読み取り完了すると、ICheck 画面がスマホに表示されます

北海道バーバリアンス  
ラグビーアンドスポーツクラブ



## 2. ICheck 画面で、新規登録、を選んでください。

## 3. メールアドレス入力画面で

スマホで読めるメアドを入力ください。



## 4. ICheck から届いたメールの URL から、

ICheck 画面に入り直します。



5. 自分のパスワードを決めて登録してください。

6. 「説明書・同意書の確認」同意してください。

7. 個人情報入力に進みます。

\* 社員番号は入力しなくて OK です。

\* 職種は学生で OK です。

6. 抗原検査をする、を選んで検査をしてください。

7. 終わった後、画面の指示にそって結果を送信ください。

\* 熱は平熱か、朝の体温で OK です。

☆スマホをお持ちでない場合、または、スマホからの登録が上手くいかない場合

（\*通信状況や機種事業で上手く登録できないケースがあります）

チームの部長、監督、主務が、検査を終了した検査キットの写真を撮って保存してください。

☆検査結果が、万一、陽性の場合は、即座に地元自治体の保健所に連絡の上で、

医療機関による PCR 検査を受けるなど保健所の指示に従って行動してください。

以上